

MASCHERE FACCIALI DI PROTEZIONE "WEARE BABY-I"

Dispositivo Medico di Classe I

RDM = 1979317

CND T020699 - Mascherine chirurgiche - Altre



DESCRIZIONE

Maschere facciali ad uso medico, non sterili, riutilizzabili, con filtro sostituibile. Tipo I (in accordo con EN 14683:2019). BFE≥95%

TAGLIA

Unica

DESTINAZIONE D'USO

Destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili. Sono, inoltre, destinate a ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.

MATERIE PRIME

- Involucro: Surlyn PC2000
- Portafiltro: Resina in policarbonato rossa
- Filtro: Tessuto composto da fibre: 96% CO - 4% EL

SPECIFICHE TECNICHE

Le maschere Weare sono dispositivi non sterili, riutilizzabile con filtro sostituibile.

Costituita da:

- Portafiltro
- Filtro
- Involucro
- Elastici Latex Free

MODALITÀ DI PULIZIA E RIUTILIZZO

Ad ogni riutilizzo si raccomanda di pulire involucro e porta filtri con un panno imbevuto in alcol etilico denaturato. E' possibile lavare il filtro e riutilizzarlo per un massimo di 20 volte a seguito di lavaggio per immersione in un litro di acqua a 33/36°C con l'aggiunta di 5 grammi di ipoclorito di sodio (es: Candeggina), lasciare a mollo per 30 minuti, sciacquare abbondantemente sotto acqua corrente e lasciare asciugare completamente all'aria.

CONFORMITÀ

Regolamento (UE) 2017/745; ISO 10993-1:2018; UNI EN 14683:2019

CONFEZIONAMENTO

Le mascherine vengono vendute singolarmente confezionate all'interno di busta in polipropilene etichettata e corredata di istruzioni per l'uso.

SMALTIMENTO

In caso di guasto o usura dei materiali, smaltire secondo le normative vigenti.

Involucro e portafiltri: raccolta plastica;
Filtro: rifiuti indifferenziati.

FABBRICANTE

Renometal S.r.l
Via Davia, 3-40017 S.G.Persiceto (BO)
Italy Tel. +39 051/826790

DISTRIBUTORE UFFICIALE

Encoplast S.p.A.
Via Chiarini,1 - 41037 Mirandola (MO) - Italy
Tel. +39 0535610333 Fax +39 0535 610468
Email: info@encoplast.com

CODICE	REVISIONE	EMISSIONE	DATA	REPARTO	
7500099005	/	382/20	31/07/20	R&D Emanuele Righini	RAQ Riccardo Bautti