

## MASCHERE FACCIALI DI PROTEZIONE "WEARE-I"

Dispositivo Medico di Classe I

RDM = 1979306

CND T020699 - Mascherine chirurgiche - Altre



### DESCRIZIONE

Maschere facciali ad uso medico, non sterili, riutilizzabili, con filtro sostituibile. Tipo I (in accordo con EN 14683:2019). BFE $\geq$ 95%

### TAGLIA

Unica

### DESTINAZIONE D'USO

Destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili. Sono, inoltre, destinate a ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.

### MATERIE PRIME

- Involucro: Surlyn PC2000
- Portafiltro Surlyn PC 2000
- Filtro: Tessuto composto da fibre: 96% CO - 4% EL

### SPECIFICHE TECNICHE

Le maschere Weare sono dispositivi non sterili, riutilizzabile con filtro sostituibile.

Costituita da:

- Portafiltro
- Filtro
- Involucro
- Elastici Latex Free

### MODALITÀ DI PULIZIA E RIUTILIZZO

Ad ogni riutilizzo si raccomanda di pulire involucro e porta filtri con un panno imbevuto in alcol etilico denaturato. E' possibile lavare il filtro e riutilizzarlo per un massimo di 20 volte a seguito di lavaggio per immersione in un litro di acqua a 33/36°C con l'aggiunta di 5 grammi di ipoclorito di sodio (es: Candeggina), lasciare a mollo per 30 minuti, sciacquare abbondantemente sotto acqua corrente e lasciare asciugare completamente all'aria.

### CONFORMITÀ

Regolamento (UE) 2017/745; ISO 10993-1:2018; UNI EN 14683:2019

### CONFEZIONAMENTO

Le mascherine vengono vendute singolarmente confezionate all'interno di busta in polipropilene etichettata e corredata di istruzioni per l'uso.

### SMALTIMENTO

In caso di guasto o usura dei materiali, smaltire secondo le normative vigenti.

Involucro e portafiltri: raccolta plastica;

Filtro: rifiuti indifferenziati.

### FABBRICANTE

Renometal S.r.l  
Via Davia, 3-40017 S.G.Persiceto (BO)  
Italy Tel. +39 051/826790

### DISTRIBUTORE UFFICIALE

Encaplast S.p.A.  
Via Chiarini,1 - 41037 Mirandola (MO) - Italy  
Tel. +39 0535610333 Fax +39 0535 610468  
Email: info@encaplast.com

CODICE	REVISIONE	EMISSIONE	DATA	REPARTO	
7500099004	/	382/20	31/07/20	R&D Emanuele Righini	RAQ Riccardo Bautti